



REZEPTIERUNG FÜR röck ASO*:
 Achillessehnenlaforthese mit optimierten
 Abrollsohlen, definierten, einstellbaren
 Positionen und Aussparungen des
 Achillessehnenbereiches nach Dr. Zerbian/
 Dolezal bzw. nach perpedesröck
HMV-POS. 23.06.01.1007

röck ASO -

EINSATZGEBIETE / INDIKATION:

[Zur frühfunktionellen Versorgung
 nach konservativer oder operativer
 Behandlung von Verletzungen der
 Achillessehne

DIE ACHILLESSEHNEN-LAUFORTHESE

nach Dr. Zerbian/Dolezal

röck ASO
 HMV-POS. 23.06.01.1007

WIRKUNGSWEISE / EIGENSCHAFTEN

- Vollbelastung von Beginn an, ohne Unterarmgehstützen
- Entlastung der Achillessehne durch fixieren in Spitzfußstellung bei stufenweise einstellbarem Winkel in Plantarflexion von 25°, 13° und 0° (durch im Lieferumfang enthaltene Laufsohlen), damit sukzessives Steigern der Zugbelastung auf die Achillessehne
- durch die zwei langen Wadenschalen samt atmungsaktiven Polstern entsteht bei jedem Schritt ein „Hautspiel“, welches die Durchblutung und somit die Wundheilung fördert
- durch die frühfunktionelle Teilbelastung der Achillessehne kann sich die Sehnenstruktur der Belastung entsprechend ausrichten; Gefahr von Kontrakturen, Arthroprien werden minimiert, ebenso das Thromboserisiko
- optimale Hygienevoraussetzungen, weil der Bereich der Achillessehne freigehalten ist
- durch einfaches Anlegen und Abnehmen der Orthese ist die Möglichkeit zur physiotherapeutischen Rehabilitation und Mobilisation jederzeit gegeben
- Thermoplastisch verformbar
- optional Wetterschutz erhältlich



röck ACRYL®
 GLASFASER



* Angaben zur Rezeptierung gelten nur in Deutschland

THERAPIEPLANBEISPIEL: Der Therapieplan ist vom Arzt in Zusammenarbeit mit dem Techniker und Physiotherapeut festzulegen. Der Sitz und die Passform der Orthese ist regelmäßig durch den Techniker/Arzt/Physiotherapeut zu prüfen, um gegebenenfalls Korrekturen vornehmen zu können.

postoperativ

ab 5. Tag

3. - 4. Woche

6. - 7. Woche

nach weiteren 14 Tagen

Mobilisation in ASO mit 25° Laufsohle bei voller Belastung

Umstellung der Orthese auf 13° Laufsohle

Umstellung auf 0° Laufsohle

Abtrainieren der Orthese - langsame Belastungssteigerung

(evtl. Weiterversorgung mit Silikonfersenkissen)

konservativ

ab 1. Tag

5. - 6. Woche

10. - 12. Woche

nach weiteren 14 Tagen

Mobilisation in ASO mit 25° Laufsohle

Umstellung der Orthese auf 13° Laufsohle

Umstellung auf 0° Laufsohle


Abtrainieren der Orthese und langsame Belastungssteigerung

(evtl. Weiterversorgung mit Silikonfersenkissen)



BAUTEILE DER *röck* ASO (BESTELLINFORMATIONEN SIEHE PREISLISTE)

- [1] **röck ASO-WADENSCHALEN MIT POLSTER**
 - thermoplastisch verformbar, stabil, besonders leicht durch Carbonfaserverstärkung
- [2] **röck ASO-FUSSSCHALE MIT SOHLENPOLSTER**
 - bestehend aus Fußschale [2.1], Verbindungszapfen [2.2] und atmungsaktivem, wasch- und auswechselbarem Sohlenpolster [2.3]
- [3] **ARRETIERUNGSSCHRAUBE**
- [4] **röck ASO-VERSTELLSCHIEBE, O-RING UND SCHRAUBEN**
 - zum Einstellen beim Wechseln der Laufsohlen
- [5] **röck ASO-LAUFSOHLEN**
 - aus Leichtporo mit rutschfester Sohle aus Zellkrepp 25° [5.1], 13° [5.2], 0° [5.3]
- [6] **KLETTVERSCHLÜSSE**
 - inklusive aller Nieten und Haftscheiben für die Wadenschalen [6.1], für die Fußschalen [6.2]
- [7] **röck ASO-POLSTERSATZ**
 - mit Flauschpunkten zur Fixierung, atmungsaktiv, wasch- und auswechselbar, bestehend aus Wadenschalenpolster [7.1], Sohlenpolster [7.2]

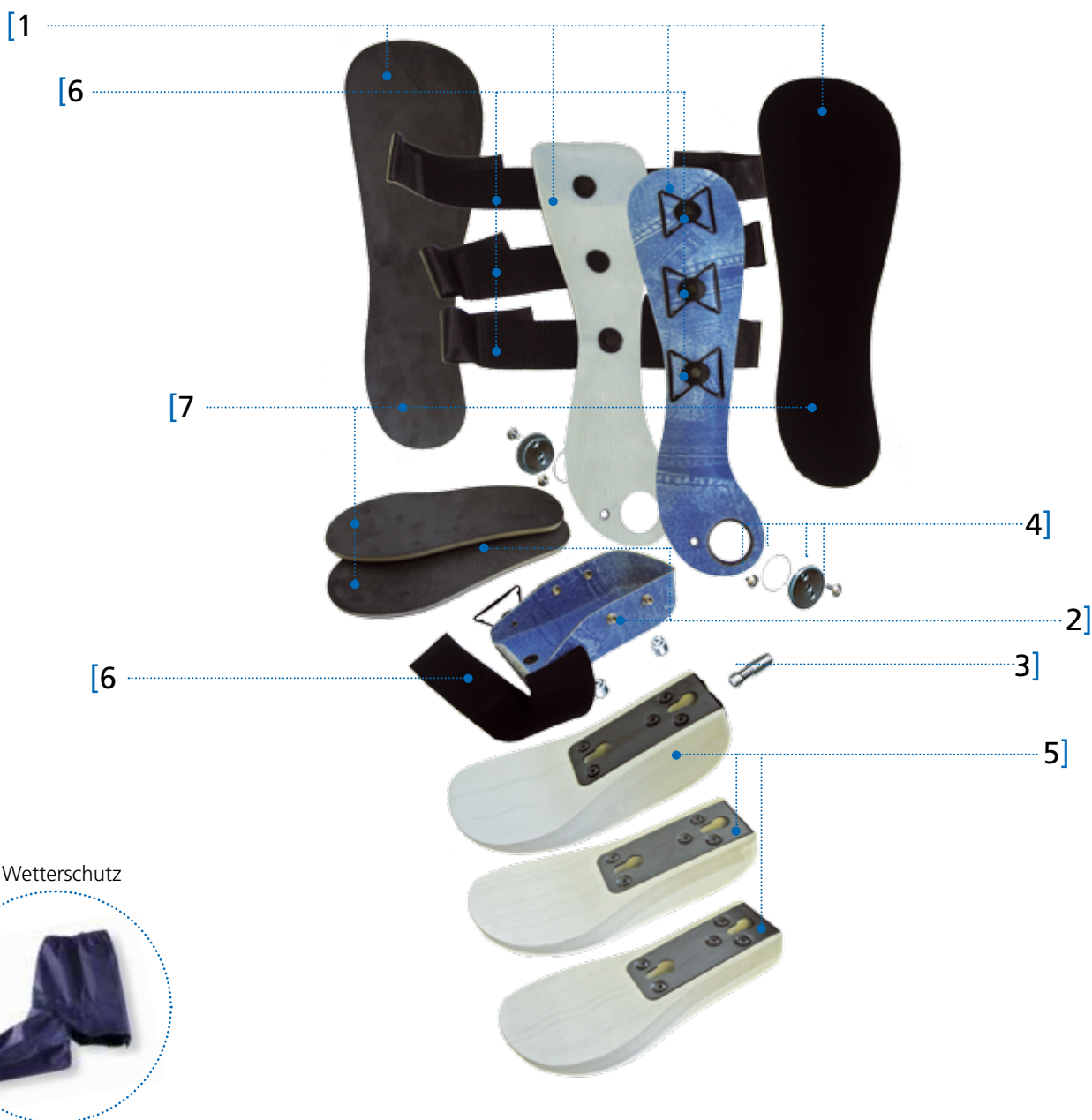

[ASO- Wetterschutz



DER rÖck-ASO-KOMPLETTBAUSATZ

| KURZBEZEICHNUNG | SEITE | Größe | DEKOR |
|-------------------------------|----------|-----------|----------|
| ASO Achillessehnenlauforthese | L Links | 1 (37-43) | JS jeans |
| | R Rechts | 2 (44-48) | |
| | | 3 (49-51) | |



DEKOR JEANS

VORTEILE FÜR DEN PATIENTEN:

- optimale Entlastung der Achillessehne
- Operationsnarbe bleibt frei
- geringe Muskelarthrophien durch Ruhigstellung des OSG
- Wetterschutz optional



BESTELLBEISPIEL:

Sie möchten für Ihren Patienten eine ASO für den rechten Fuß, in der Größe 40 im Dekor jeans bestellen.

Dann lautet die Bestell-Nr.: **A S O R 1 J S** [= Kurzbez., Seite, Größe]