

das leben ist zu schön,
um liegen bleiben zu müssen



REZEPTIERUNG FÜR röck CFO*:
Calcaneusfrakturorthese mit hoher
Wadenanstützung und Vollentlastung
bzw. Teilbelastungsmöglichkeiten nach
perpedesröck

röck CFO -

EINSATZGEBIETE / INDIKATION:

- [Zur frühfunktionellen Versorgung von Calcaneusfrakturen jeglicher Art
- [Zur Entlastung der Ferse bei Ulkus oder Schmerzzuständen im Bereich des Rückfußes

DIE CALCANEUSFRAKTUR-ORTHESE


röck CFO

HMV-POS. 23.03.02.3003

nach K. Blasberg / Eduarduskrankenhaus. Köln

WIRKUNGSWEISE / EIGENSCHAFTEN

- komplette Entlastung und Einstellung des Entlastungsfreiraums im Fersenbereich durch spezielle Konstruktion der individuell bearbeitbaren Orthesenschale und der anatomisch geformten Mittelfußstütze
- frühe Teilbelastung möglich durch im Lieferumfang enthaltene Fersen-Teilbelastungspolster, folglich schneller Knochenwiederaufbau durch Frühfunktionalität
- hohe dorsale Wadenfassung zur möglichst großflächigen Abstützung der Wadenmuskulatur sowie zur Verhinderung eines evtl. Einsinkens der Ferse in den plantaren Freiraum und eines evtl. verstärkten Zuges der Achillessehne auf die Ansatzstelle am Calcaneus
- hervorragende Wundheilungsvoraussetzungen (kein Aufplatzen der Narbe), starre Schalen im Fußbereich sorgen für ausreichend Stabilität des Fußes, maximale Hygiene und kürzere Behandlungszeiten durch optimierte anpassbare Fußbettung
- harmonisches Abrollverhalten durch eingearbeitete Abrollung im Vorfußbereich trotz ruhig gestelltem Sprunggelenk
- Verzicht auf Unterarmgehstützen möglich, kein kontralateraler Ausgleich notwendig; Sohlenhöhe von ca. 2,5 - 3 cm ist ausreichend
- durch einfaches Anlegen und Abnehmen der Orthese ist die Möglichkeit zur physiotherapeutischen Rehabilitation und Mobilisation jederzeit gegeben
- einfach und schnell an den Patienten anzupassen
- im Lieferumfang enthaltener Wetterschutz

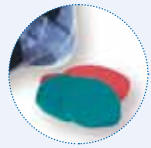

PRAXIS-TIPP:
Sollte im hinteren Bereich der Orthese nicht ausreichend Platz vorhanden sein, kann mit einem Fön thermoplastisch erweitert werden.



Entlastung Fuß/Sprunggelenk

THERAPIEPLANBEISPIEL: Der Therapieplan ist vom Arzt in Zusammenarbeit mit dem Techniker und Physiotherapeut festzulegen. Der Sitz und die Passform der Orthese ist regelmässig durch den Techniker/Arzt/Physiotherapeut zu prüfen, um gegebenenfalls Korrekturen vornehmen zu können.

postoperativ

- 2. Tag - 4. Woche: Nach Entfernung des Drainage-Materials Teilbelastung durch im Lieferumfang enthaltene Fersen-Teilbelastungspolster bis ca. 20 kg. Druckmessung wird empfohlen.
- 6. - 12. Woche: Steigerung der Belastung und Abtrainieren der Orthese.

konservativ

- 0. - 5. Tag: Nach Abschwellung und Kompressionsversorgung Orthese ohne Belastung.
- 14. Tag - 6. Woche: Langsame Steigerung der Teilbelastung durch im Lieferumfang enthaltene Fersen-Teilbelastungspolster bis ca. 20 kg. Druckmessung wird empfohlen.
- 6. - 12. Woche: Steigerung der Belastung und Abtrainieren der Orthese.

BAUTEILE DER *röck* CFO (BESTELLINFORMATIONEN SIEHE PREISLISTE)

[1] ORTHESENSCHALE KOMPL. MIT KLETTSTREIFEN

- aus Polyethylen mit bereits angebrachten Microklettstreifen zur Anbringung des Wadenpolsters

[2] WADENPOLSTER

- aus Mikro-Vlies
- atmungsaktiv, wasch- und auswechselbar

[3] MITTELFUSS-STÜTZE

- individuell bearbeitbar
- anatomisch geformt, bessere Bettung durch Ausarbeitung einer speziellen Abrollung und einer vorgeformten Längsgewölbestütze

[4] VERSCHLUSS-SATZ MIT NIETEN

[5] SOHLEN

- aus abrieb- und rutschfestem Zellkrepp

[6] FERSEN-TEILBELASTUNGSPOLSTER

- selbstklebend zum individuellen Einkleben

[7] WETTERSCHUTZ

- aus absolut wasserdichtem druckimprägniertem, Polyester-Gewebe



DER r_öck-CFO-KOMPLETTBAUSATZ

KURZBEZEICHNUNG	SEITE	Größe
CFO Calcaneusfrakturorthese	L Links	S (36-38)
	R Rechts	M (39-41)
		L (42-44)
		XL (45-47)
		XXL (47-50)

VORTEILE FÜR DEN PATIENTEN:

- hohe Wadenstützung
- kein kontralateraler Schuhhöhenausgleich erforderlich
- rutschhemmende Sohle auch im Feuchtbereich verwendbar
- angenehmes Tragegefühl
- Wetterschutz im Lieferumfang enthalten



DEKOR-JEANS



BESTELLBEISPIEL:

Sie möchten für Ihren Patienten eine CFO für den rechten Fuß, in der Größe 40 bestellen.

Dann lautet die Bestell-Nr.: **C F O R M** [= Kurzbez., Seite, Größe]